

# Instrucciones para el Kit de Uso Personal


**Lea cuidadosamente las instrucciones antes de recolectar la muestra.  
Los resultados pueden ser inválidos si la prueba no se realiza correctamente.**

## Depósito de la muestra

- 1.** Ponga la hoja de recolección en la taza del escusado, por encima del agua.
- 2.** Deposite la muestra de excremento sobre la hoja de recolección.
- 3.** Tome la muestra de excremento antes de que la hoja de recolección se hunda y la muestra de excremento toque el agua.
- 4.** Baje el agua del escusado. La hoja de recolección es biodegradable y no afectará el drenaje.

## Recolección de la muestra


- 1.** Anote la fecha y hora en la línea de la fecha, y toda la información requerida en la botella de la muestra.

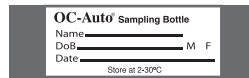


Para abrir la botella, gire y jale la tapa verde.



- 2.** Pase el pequeño tubo de recolección por la superficie de la muestra fecal.

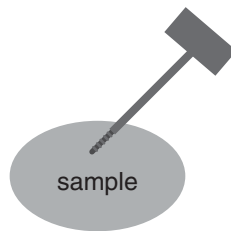

Cubra toda la parte rayada del tubo de recolección con la muestra de excremento.

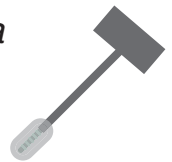

- 3.** Para cerrar la botella de muestra, inserte el tubo de recolección y cierre bien la tapa verde. No vuelva a abrir la botella.



Devuelva la botella de muestreo a su médico o al laboratorio en el sobre proporcionado. Por favor, **NO** envíe por correo a Polymedco.

